


CARDIOVIT FT-1

Wo Leistung auf Portabilität trifft

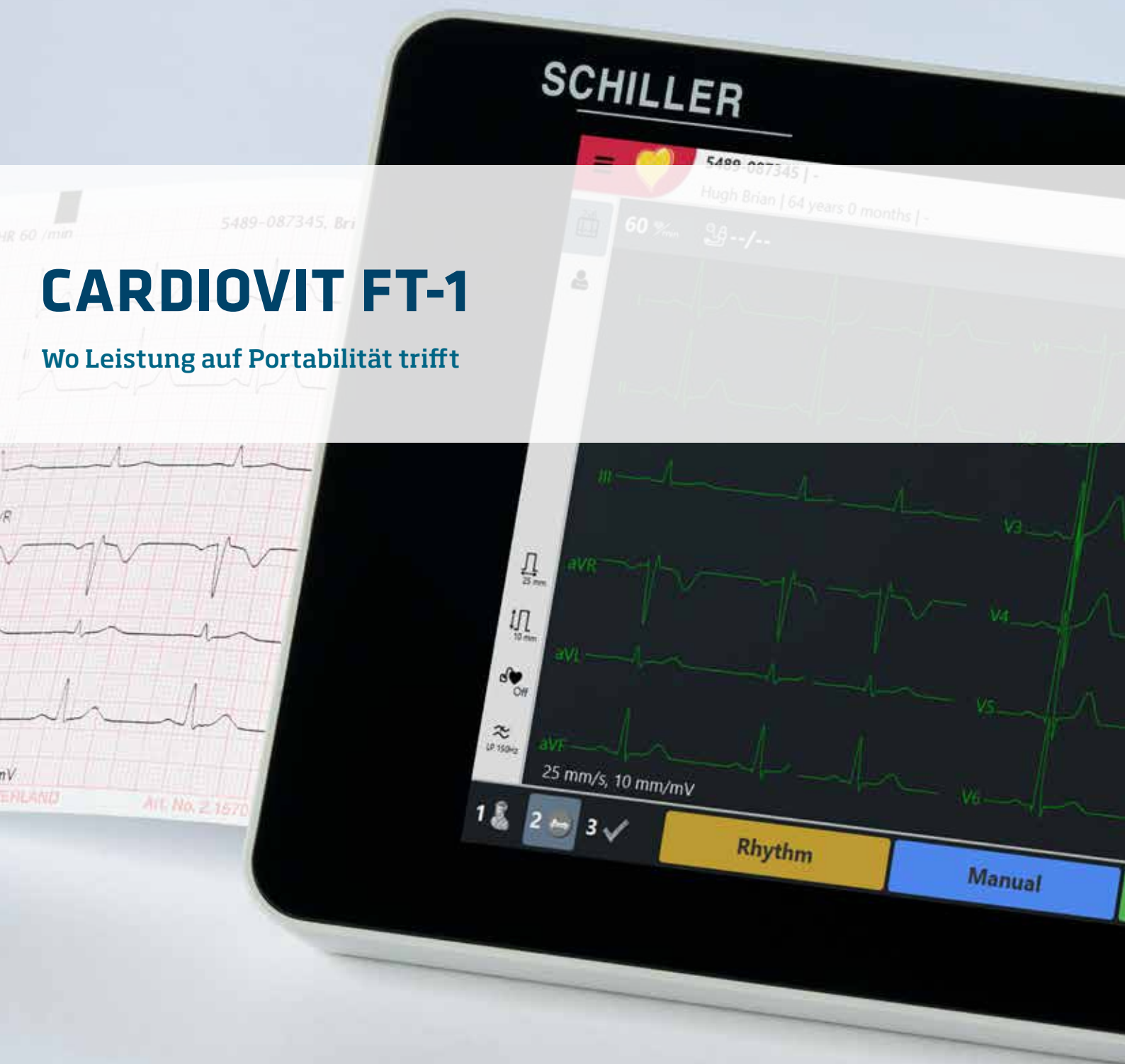


SCHILLER
The Art of Diagnostics

CARDIOVIT FT-1

Das SCHILLER 12-Kanal-EKG:

- Einzigartiges Design
- Intuitiver 3-Schritte-Arbeitsablauf für eine mühelose Anwendung
- Rasche und sichere bidirektionale Wi-Fi-Kommunikation
- Herausragende EKG-Signalqualität bei Erwachsenen und Kindern

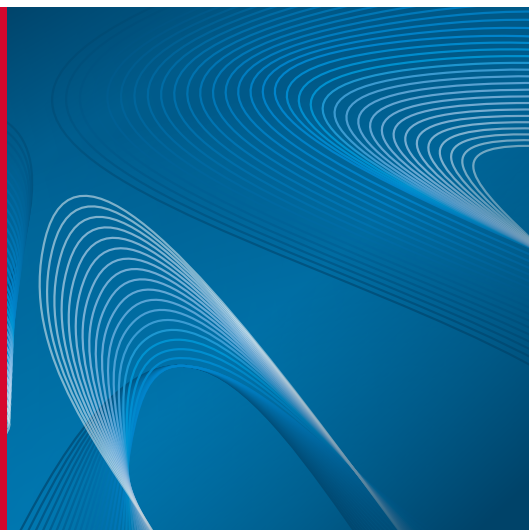

Schnelles und sicheres Login mittels Keycard, bereitgestellt von Imprivata.

EINZIGARTIGES DESIGN MIT INTEGRIERTEM DRUCKER

CARDIOVIT FT-1 ist ein ultraportabler 12-Kanal-Elektrokardiograph, der inklusive Akku nur knapp über ein Kilogramm wiegt. Er verfügt über einen hochauflösenden 8"-Multi-Touch-Bildschirm und einen integrierten Thermodrucker.

UMFANGREICHE VERNETZUNG

Bidirektionale Kommunikation für einen einfachen Datenzugriff über die Arbeitsliste oder Patientenabfrage (PDQ) sowie schnelles Senden aller Berichte an EPA-/HIS-Systeme. Sichere Wi-Fi-Konnektivität, kombiniert mit EKG-Vorschau auf dem Bildschirm und einem grossen Speicher, ermöglicht zuverlässige papierlose Arbeitsabläufe und reduziert Kosten.

ERWEITERTE CYBERSICHERHEIT

CARDIOVIT FT-1 bietet eine ausserordentliche Cybersicherheit durch:

- Höhere Linux-Kernel-Sicherheit für maximalen Schutz vor Cyberangriffen
- Konfigurierbare Zugriffsbeschränkungen dank Benutzernamen, Passwort und Zugriffsrechten sowie Enterprise Access Management (EAM) von Imprivata für Tap-and-go-Zugang zum Schutz vor nicht autorisiertem Zugriff
- Wi-Fi-Protokolle mit zertifikatsbasierter Authentifizierung: für einen sicheren Zugang zur IT-Infrastruktur eines Krankenhauses
- Verbesserte Sicherheit durch Deaktivierung nicht verwendeter USB-Anschlüsse

HIGH-END-DIAGNOSE-TOOLS

RUHE-RHYTHMUS: CARDIOVIT FT-1 zeichnet alle 12 Kanäle während bis zu 4 Minuten auf, um das Risiko zu verringern, klinisch relevante Rhythmusereignisse zu übersehen. Aufzeichnungen können gedruckt, gespeichert, überprüft und übertragen werden.

ETM MIT ETM SPORT (OPTIONAL):

Das renommierte Interpretationsprogramm von SCHILLER für simultane 12-Kanal-EKGs bietet Qualität und Zuverlässigkeit ohne Kompromisse. ETM Sport für die Interpretation von Sportler-EKGs zur Unterscheidung zwischen physiologischen und pathologischen EKG-Abweichungen, um die Anzahl falsch-positiver Ergebnisse zu reduzieren.

CCAA (OPTIONAL): Der Culprit Coronary Artery Algorithm von SCHILLER wird in Notaufnahmen sowie ausserhalb des Krankenhauses eingesetzt, wenn bei vorliegenden Brustschmerzen sofort eine Entscheidung getroffen werden muss. Er lokalisiert sofort den Verschluss in der Koronararterie und somit die Grösse des gefährdeten Gebietes.

INTEGRIERTER DRUCKER


Integrierter
High-End-
Thermodrucker

ASSISTENT ZUR POSITIONIE- RUNG DER ELEKTRODEN

Der anatomische Assistent bietet
Unterstützung bei der Positio-
nierung der Elektroden mittels
Zoom- und Rotationsfunktionen.

ERKENNUNG VERTAUSCHTER ELEKTRODEN

Vertauschte Elektroden werden
vor dem Start der Aufzeichnung
sofort angezeigt.

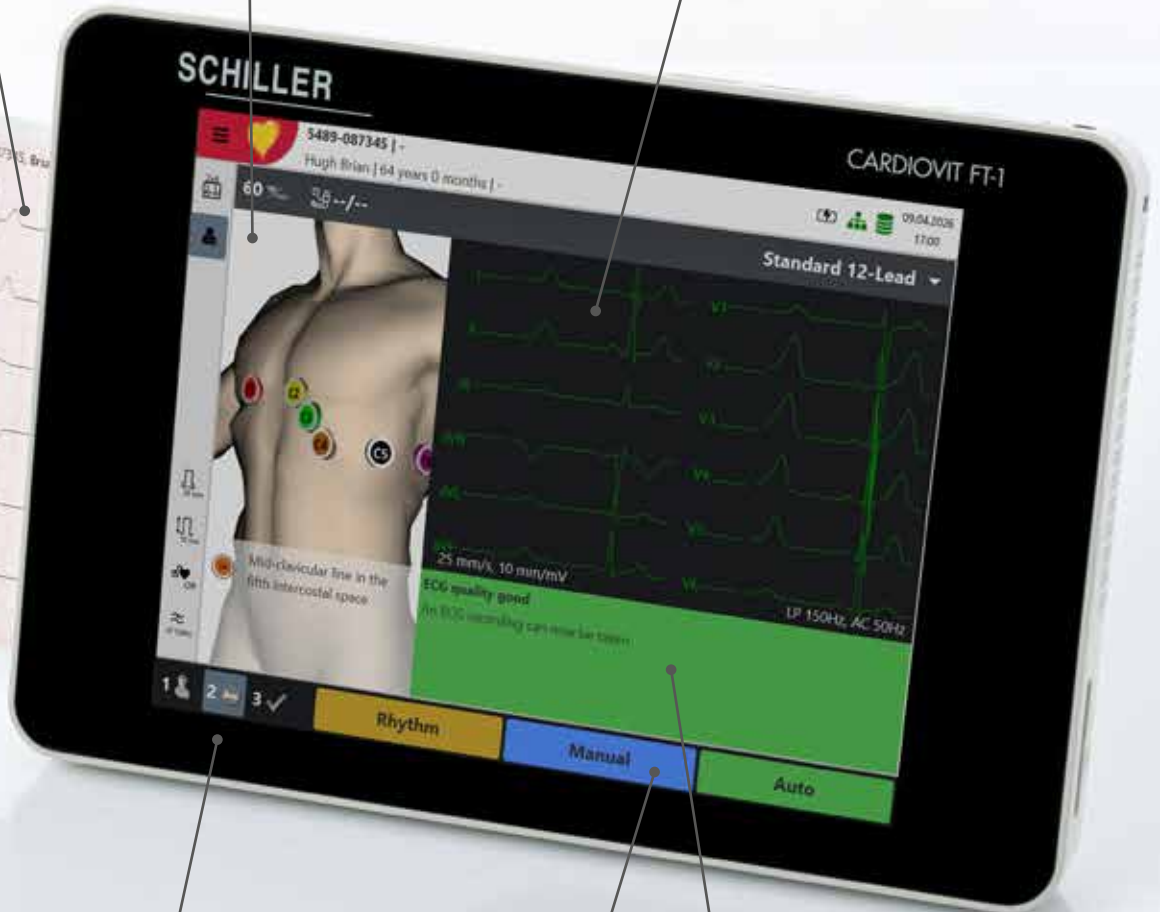

IN EINFACHEN SCHRITTEN: 1-2-3

1. Patientendaten eingeben oder herunterladen.
 2. Signalqualität überprüfen und EKG aufzeichnen.
 3. EKG vor dem Speichern, Exportieren oder Drucken überprüfen.
- Anwender können beliebig zwischen diesen Schritten navigieren.

LCD-TOUCHSCREEN

Hochauflösender
8-Zoll-Multi-Touch-
Bildschirm

PRÜFUNG DER SIGNALQUALITÄT

EKG-Übersicht über alle
12 Kanäle inklusive farbig
gekennzeichnete
Signalqualität pro Ableitung



Americas
SCHILLER Americas Inc.
Doral, Florida 33172

North America:
Phone +1 786 845 06 20
Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramericas.com
www.schilleramericas.com

Latin America & Caribbean
Phone +1 305 591 11 21
Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramericas.com
www.schilleramericas.com



Asia
SCHILLER Asia-Pacific / Malaysia
52200 Kuala Lumpur, Malaysia
Phone +603 6272 3033
sales@schiller.com.my
www.schiller-asia.com



Austria
SCHILLER Handelsgesellschaft m.b.H.
A-4040 Linz
Phone +43 732 70 99 0
sales@schiller.at
www.schiller.at



China
Alfred Schiller (Beijing) Medical Technology Co., Ltd.
100102 Beijing, China
Phone +86 10 84565453
info@schillerchina.com
www.schillermedical.cn



Croatia
SCHILLER d.o.o.
10000 Zagreb
Phone +385 1 4059 559
info@schiller.hr
www.schiller.hr



France
SCHILLER Médical
F-67160 Wissembourg
Phone +33 3 88 63 36 00
info@schiller.fr
www.schiller-medical.fr



France (distribution France)
SCHILLER France S.A.S.
F-77608 Bussy St Georges
Phone +33 1 64 66 50 00
contact@schillerfrance.fr
www.schiller-france.com



Germany
SCHILLER Medizintechnik GmbH
D-85622 Feldkirchen b. München
Phone +49 89 62 99 81 0
info@schillermed.de
www.schillermed.de



India
SCHILLER Healthcare India Pvt. Ltd.
Mumbai - 400 059, India
Phone +91 22 6152 3333 / 2920 9141
sales@schillerindia.com
www.schillerindia.com



Poland
SCHILLER Poland Sp. z o.o.
PL-02-729 Warszawa
Phone +48 22 843 20 89 / +48 22 647 35 90
schiller@schiller.pl
www.schiller.pl



Russia & C.I.S.
AO SCHILLER.RU
119049 Moscow, Russia
Phone +7 (495) 970 11 33
mail@schiller.ru
www.schiller.ru



Serbia
SCHILLER d.o.o.
11010 Beograd
Phone +381 11 39 79 508
info@schiller.rs
www.schiller.rs



Slovenia
SCHILLER d.o.o.
2310 Slovenska Bistrica
Phone +386 2 843 00 56
info@schiller.si
www.schiller.si



Spain
SCHILLER ESPAÑA, S.A.
ES-28232 Las Rozas/Madrid
Phone +34 91 713 01 76
schiller@schiller.es
www.schiller.es



Switzerland
SCHILLER Schweiz AG
CH-8912 Obfelden
Phone +41 44 744 30 00
sales@schiller-schweiz.ch
www.schiller-schweiz.ch



Turkey
SCHILLER TÜRKİYE
Okmeydanı-Sisli - İstanbul
Phone +90 212 210 8681
info@schiller.com.tr
www.schiller-turkiye.com



United Kingdom
SCHILLER UK Ltd.
Bromborough, Wirral,
Merseyside, CH62 3RJ
Phone +44 1333 312150
sales@schilleruk.com
service@schilleruk.com
www.schilleruk.com

SCHILLER behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung oder weitergehende Verpflichtungen Änderungen beim angezeigten Design, den Spezifikationen und Funktionen vorzunehmen oder das beschriebene Produkt abzukündigen. Bilder sind möglicherweise nicht repräsentativ. Gewisse Produkte sind nicht für den Verkauf in allen Märkten zugelassen. Kontaktieren Sie Ihren SCHILLER-Vertreter für aktuellste Informationen zur Verfügbarkeit.

