

BP-200 plus


Monitor de presión arterial automático para pruebas de esfuerzo cardiaco



SCHILLER
The Art of Diagnostics

BP-200 plus

- ∴ Integración directa: la comunicación automática con el dispositivo de ECG esfuerzo de SCHILLER reduce el riesgo de errores de transmisión.
- ∴ Modo de PA sin esfuerzo: permite medir la PA durante la configuración y recuperación del paciente sin señal de ECG.
- ∴ Mediciones verificadas: observe los sonidos de Korotkoff utilizando la visualización en pantalla.

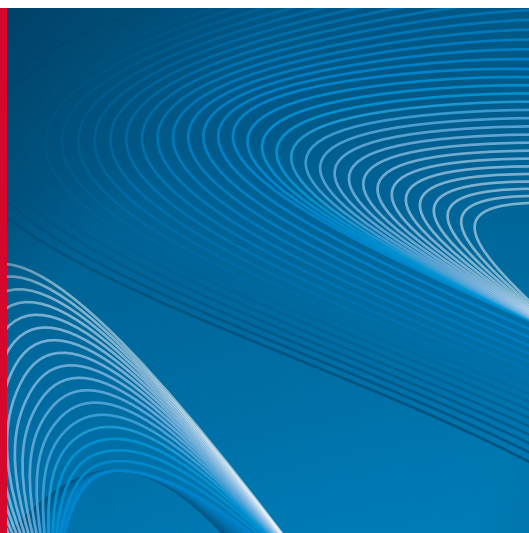

MEDICIONES DE PA Y SPO₂ PARA EL ENTORNO DE PRUEBAS DE ESFUERZO

El monitor de presión arterial BP-200 plus está diseñado para ofrecerle la confianza de saber que la vibración mecánica, el movimiento del paciente y la variabilidad del observador no interfieren en la precisión de su lectura. Su atención podrá centrarse en lo que más importa: el paciente. La interfaz manos libres y la opción de medición del SpO₂ hacen del BP-200 plus un completo dispositivo para los centros de pruebas diagnósticas. El BP-200 plus también es ideal en centros de investigación porque los datos sin procesar pueden guardarse en una tarjeta SD.

SCHILLER K-SOUND ANALYSIS PARA MEDICIONES DE PRECISIÓN

Gracias al SCHILLER K-Sound Analysis (SKA), el BP-200 plus sobresale donde otros monitores de PA fallan. SKA se desarrolló como resultado de un trabajo pionero de SCHILLER sobre la monitorización ambulatoria de la presión arterial durante 24 horas. Fue esta experiencia la que proporcionó al equipo de investigación y desarrollo de SCHILLER valiosos conocimientos sobre la relación existente entre muchas de las variables implicadas en la determinación de la presión arterial de un paciente en movimiento. Estas variables son, entre otras, los sonidos K, la forma general del cuerpo, las características de las pisadas, los movimientos del brazo y el ruido del tapiz rodante y el ergómetro. Con el SCHILLER K-Sound Analysis, los sonidos

de Korotkoff se distinguen de los artefactos de forma que las presiones arteriales se miden con precisión y se reducen considerablemente las falsas mediciones.

COMUNICACIÓN AUTOMÁTICA CON EL SISTEMA DE ECG ESFUERZO DE SCHILLER

Registrar una medición precisa y fiable de la PA o del valor de SpO₂ con precisión y fiabilidad en los intervalos correctos durante una prueba de ECG esfuerzo puede ser difícil y estresante para médicos y técnicos de laboratorio. Esa es la razón por la que el BP-200 plus adopta los intervalos programados del dispositivo de ECG esfuerzo de SCHILLER y se asegura así de que las mediciones siempre se tomen en el mismo momento durante cada etapa, lo que aumenta la fiabilidad de la medición.

PA sistólica, PA diastólica, presión arterial media, SpO₂ (opción), pulso periférico y doble producto (sys × HR)

5 botones para facilitar la programación y el manejo



Visualización de sonidos de Korotkoff u ondas de disparo

El manguito de PA de SCHILLER está diseñado para ofrecer el mejor confort durante los ECG esfuerzo





Americas
SCHILLER Americas Inc.
 Doral, Florida 33172

North America:
 Phone +1 786 845 06 20
 Fax +1 786 845 06 02
 sales@schilleramericas.com
 www.schilleramericas.com

Latin America & Caribbean
 Phone +1 305 591 11 21
 Fax +1 786 845 06 02
 sales@schilleramericas.com
 www.schilleramericas.com



Asia
SCHILLER Asia-Pacific / Malaysia
 52200 Kuala Lumpur, Malaysia
 Phone +603 6272 3033
 Fax +603 6272 2030
 sales@schiller.com.my
 www.schiller-asia.com



Austria
SCHILLER Handelsgesellschaft m.b.H.
 A-4040 Linz
 Phone +43 732 70 90
 Fax +43 732 757 000
 sales@schiller.at
 www.schiller.at



China
Alfred Schiller (Beijing) Medical Equipment Co.,Ltd.
 100015 Beijing, China
 Phone +86 010 52007020
 Fax +86 010 52007020-8016
 info@schillerchina.com
 www.schillermedical.cn



Croatia
SCHILLER d.o.o.
 10000 Zagreb
 Phone +385 1 309 66 59
 Fax +385 1 309 66 60
 info@schillerzg.hr
 www.schiller.hr



France
SCHILLER Médical
 F-67160 Wissembourg
 Phone +33 3 88 63 36 00
 Fax +33 3 88 63 36 49
 info@schiller.fr
 www.schiller-medical.com



France (distribution France)
SCHILLER France S.A.S.
 F-77608 Bussy St Georges
 Phone +33 1 64 66 50 00
 Fax +33 1 64 66 50 10
 contact@schillerfrance.fr
 www.schiller-france.com



Germany
SCHILLER Medizintechnik GmbH
 D-85622 Feldkirchen b. München
 Phone +49 89 62 99 81 0
 Fax +49 89 609 50 90
 info@schillermed.de
 www.schillermed.de



India
SCHILLER Healthcare India Pvt. Ltd.
 Mumbai - 400 059, India
 Phone +91 22 6152 3333 / 2920 9141
 Fax +91 22 2920 9142
 sales@schillerindia.com
 www.schillerindia.com



Poland
SCHILLER Poland Sp. z o.o.
 PL-02-729 Warszawa
 Phone +48 22 843 20 89 / +48 22 647 35 90
 Fax +48 22 843 20 89
 schiller@schiller.pl
 www.schiller.pl



Russia & C.I.S.
AO SCHILLER.RU
 125040 Moscow, Russia
 Phone +7 (495) 970 11 33
 Fax +7 (495) 956 29 10
 mail@schiller.ru
 www.schiller.ru



Serbia
SCHILLER d.o.o.
 11010 Beograd
 Phone +381 11 39 79 508
 Fax +381 11 39 79 518
 info@schiller.rs
 www.schiller.rs



Slovenia
SCHILLER d.o.o.
 2310 Slovenska Bistrica
 Phone +386 2 843 00 56
 Fax +386 2 843 00 57
 info@schiller.si
 www.schiller.si



Spain
SCHILLER ESPAÑA, S.A.
 ES-28232 Las Rozas/Madrid
 Phone +34 91 713 01 76
 Fax +34 91 355 79 33
 schiller@schiller.es
 www.schiller.es



Switzerland
SCHILLER-Reomed AG
 CH-8912 Obfelden
 Phone +41 44 744 30 00
 Fax +41 44 740 37 10
 sales@schiller-reomed.ch
 www.schiller-reomed.ch



Turkey
SCHILLER TÜRKIYE
 Okmeydani-Sisli - Istanbul
 Phone +90 212 210 8681 (pbx)
 Fax +90 212 210 8684
 info@schiller.com.tr
 www.schiller-turkiye.com



United Kingdom
SCHILLER UK
 Bellshill, ML4 3PR
 Phone +44 1698 744 505
 Fax +44 1698 744 474
 sales@schilleruk.com
 www.schilleruk.com

La disponibilidad del dispositivo en un mercado determinado está sujeta a la autorización administrativa.

2019/06_E5



Article no.: 2_500308



SCHILLER
 The Art of Diagnostics