

CARDIOVIT AT-180

Eficiencia, rendimiento, ciberseguridad

SCHILLER



001 | -

Smith John | 19 years | Male



25 mm/s, 20 mm/mV

f_s 0


Patient



CARDIOVIT AT-180

Reconocida tecnología
SCHILLER en el electrocardiografía de última generación
CARDIOVIT AT-180:

- Alta eficiencia en cualquier entorno; adquisición de ECG con solo tres clics
- Ciberseguridad
- Herramientas clínicas avanzadas

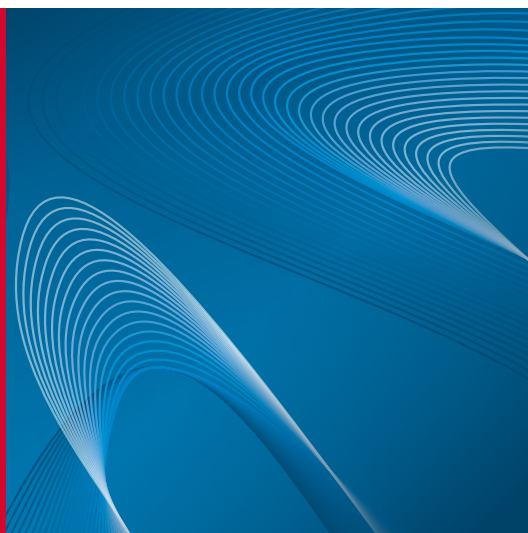

Cree un ECG reposo de 10 segundos a partir de un registro de ritmo reposo de hasta 20 minutos con el ECG Framer

ALTA EFICIENCIA EN CUALQUIER ENTORNO

Desde el servicio de urgencias hasta la consulta de cardiología, la eficiencia y la calidad son esenciales. La adquisición de ECG nunca ha sido más rápida: puede introducir o descargar los datos del paciente a través de una lista de trabajo o PDQ, adquirir el ECG, imprimir y transmitir los datos con solo tres clics.



EN 3 SENCILLOS PASOS

1. Introduzca o descargue los datos del paciente. Sin errores con el código de barras y la función PDQ.
2. Compruebe la calidad de la señal y la posible inversión de derivaciones antes de la adquisición.
3. Revise el ECG, edite las mediciones y escriba el informe antes de exportar o imprimir.

ECG FRAMER: Ahorre tiempo y evite repetir los ECG. Deje que el paciente se relaje para capturar el ECG de mejor calidad o varios ECG para la observación del paciente durante un periodo de 20 minutos. Las mediciones y la interpretación se generan automáticamente para todos los ECG. Los registros continuos de ECG de 12 derivaciones y todos los ECG capturados se almacenan localmente y se transmiten a SEMA, el sistema de gestión de datos de SCHILLER.

CIBERSEGURIDAD

La comunicación bidireccional con los sistemas EMR y HIS está disponible para todos los tipos de registro. La integridad y la protección de datos están respaldadas por opciones de seguridad mejoradas:

- Autenticación de nombre de usuario y contraseña basada en un directorio activo (a través del servidor de SCHILLER) o usuarios definidos localmente
- Protocolos de alta seguridad: para conectividad Wi-Fi
- Datos encriptados durante la transmisión

HERRAMIENTAS CLÍNICAS AVANZADAS

ETM SPORT: El primer módulo automatizado de interpretación de ECG de atletas basado en los últimos Criterios de Seattle.

ECG DE 16 DERIVACIONES: El análisis del ECG reposo de 16 derivaciones (utilizando un cable de paciente de 14 hilos) aprovecha la ventaja de un electrodo situado en el lado derecho del tórax y en la espalda para proporcionar resultados más completos en pacientes adultos con dolor en el pecho.

SAECG: El análisis de los potenciales ventriculares tardíos del ECG identifica a los pacientes que han sufrido un IM y están predispuestos a taquiarritmias ventriculares y posible muerte cardíaca súbita.

ECG VECTORIAL: Visualización tridimensional de la actividad eléctrica cardíaca y un diagnóstico completo de las paredes frontal y posterior.

Asesor integrado con modelo anatómico (función de giro y zoom) y formas de onda con código de color

Pantalla táctil de 18,5" para revisión completa del ECG


Impresora térmica de alta resolución en A4

Detección de inversión de derivaciones antes de la adquisición del ECG

Nueva e intuitiva interfaz de usuario SCHILLER

Teclado muy higiénico con una funda resistente y reemplazable que lo protege del polvo, la suciedad y los líquidos

Ruedas de fácil deslizamiento y sólido carro con bandeja para guardar accesorios

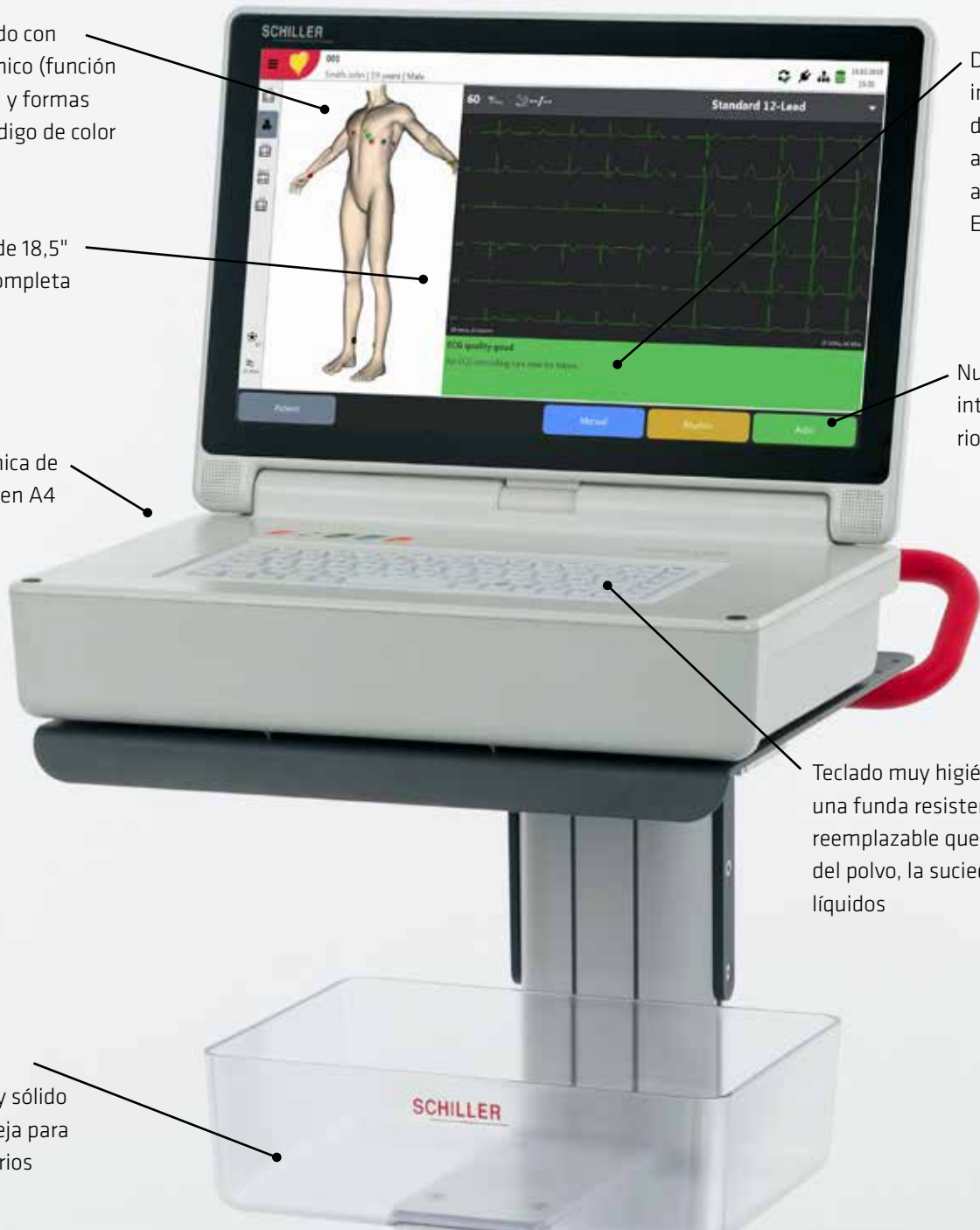

ECG ESFUERZO

Programa avanzado de esfuerzo con gran flexibilidad en la definición de protocolos para ergómetros y tapices rodantes. Imprima su informe personalizado con la impresora térmica de alta resolución. Los datos de formato comprimido permiten revisar y volver a analizar cada latido y las arritmias mejorando la confianza clínica.





Americas
SCHILLER Americas Inc.
 Doral, Florida 33172

North America:
 Phone +1 786 845 06 20
 Fax +1 786 845 06 02
 sales@schilleramericas.com
 www.schilleramericas.com

Latin America & Caribbean
 Phone +1 305 591 11 21
 Fax +1 786 845 06 02
 sales@schilleramericas.com
 www.schilleramericas.com



Asia
SCHILLER Asia-Pacific / Malaysia
 52200 Kuala Lumpur, Malaysia
 Phone +603 6272 3033
 Fax +603 6272 2030
 sales@schiller.com.my
 www.schiller-asia.com



Austria
SCHILLER Handelsgesellschaft m.b.H.
 A-4040 Linz
 Phone +43 732 70 99 0
 Fax +43 732 757 000
 sales@schiller.at
 www.schiller.at



China
Alfred Schiller (Beijing) Medical Equipment Co.,Ltd.
 100015 Beijing, China
 Phone +86 010 52007020
 Fax +86 010 52007020-8016
 info@schillerchina.com
 www.schillermedical.cn



Croatia
SCHILLER d.o.o.
 10000 Zagreb
 Phone +385 1 309 66 59
 Fax +385 1 309 66 60
 info@schillerzg.hr
 www.schiller.hr



France
SCHILLER Médical
 F-67160 Wissembourg
 Phone +33 3 88 63 36 00
 Fax +33 3 88 63 36 49
 info@schiller.fr
 www.schiller-medical.com



France (distribution France)
SCHILLER France S.A.S.
 F-77608 Bussy St Georges
 Phone +33 1 64 66 50 00
 Fax +33 1 64 66 50 10
 contact@schillerfrance.fr
 www.schiller-france.com



Germany
SCHILLER Medizintechnik GmbH
 D-85622 Feldkirchen b. München
 Phone +49 89 62 99 81 0
 Fax +49 89 609 50 90
 info@schillermed.de
 www.schillermed.de



India
SCHILLER Healthcare India Pvt. Ltd.
 Mumbai - 400 059, India
 Phone +91 22 6152 3333 / 2920 9141
 Fax +91 22 2920 9142
 sales@schillerindia.com
 www.schillerindia.com



Poland
SCHILLER Poland Sp. z o.o.
 PL-02-729 Warszawa
 Phone +48 22 843 20 89 / +48 22 647 35 90
 Fax +48 22 843 20 89
 schiller@schiller.pl
 www.schiller.pl



Russia & C.I.S.
AO SCHILLER.RU
 125040 Moscow, Russia
 Phone +7 (495) 970 11 33
 Fax +7 (495) 956 29 10
 mail@schiller.ru
 www.schiller.ru



Serbia
SCHILLER d.o.o.
 11010 Beograd
 Phone +381 11 39 79 508
 Fax +381 11 39 79 518
 info@schiller.rs
 www.schiller.rs



Slovenia
SCHILLER d.o.o.
 2310 Slovenska Bistrica
 Phone +386 2 843 00 56
 Fax +386 2 843 00 57
 info@schiller.si
 www.schiller.si



Spain
SCHILLER ESPAÑA, S.A.
 ES-28232 Las Rozas/Madrid
 Phone +34 91 713 01 76
 Fax +34 91 355 79 33
 schiller@schiller.es
 www.schiller.es



Switzerland
SCHILLER-Reomed AG
 CH-8912 Obfelden
 Phone +41 44 744 30 00
 Fax +41 44 740 37 10
 sales@schiller-reomed.ch
 www.schiller-reomed.ch



Turkey
SCHILLER TÜRKIYE
 Okmeydani-Sisli - Istanbul
 Phone +90 212 210 8681 (pbx)
 Fax +90 212 210 8684
 info@schiller.com.tr
 www.schiller-turkiye.com



United Kingdom
SCHILLER UK
 Bellshill, ML4 3PR
 Phone +44 1698 744 505
 Fax +44 1698 744 474
 sales@schilleruk.com
 www.schilleruk.com

La disponibilidad del dispositivo en un mercado determinado está sujeta a la autorización administrativa.

